



AcryRock

We take care of your smile

RĂNG NHỰA ACRYLIC




MUA **Ruthinium®** SƯU TẦM TRỌN BỘ TRANH TREO TƯỜNG

RĂNG CỬA




Chọn nhóm răng cửa

Chiều rộng của nhóm răng cửa trước được thiết lập dựa trên nghiên cứu của Lee.

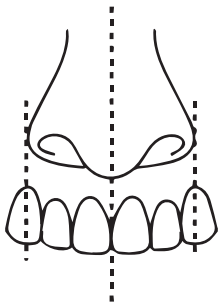

Đường thẳng đứng từ mép của cạnh răng đi qua trục răng nanh.

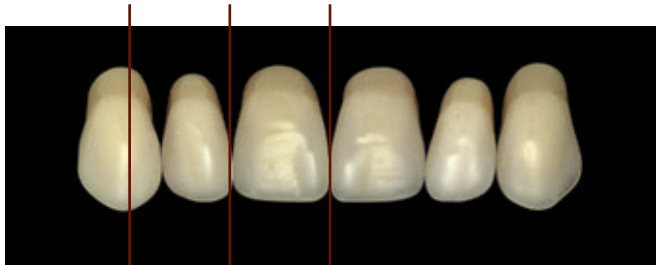


C L C = L


Độ rộng trung tâm được tính gồm phần bên cộng với phần giữa răng nanh.

Thiết lập hình dạng răng theo Williams:


Hình dạng răng được chọn lựa theo hình dạng của khuôn mặt.

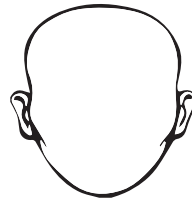

Hình vuông

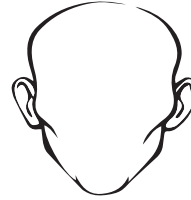




Hình tam giác

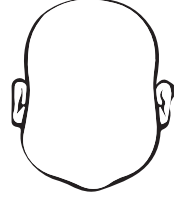

Hình trứng




Theo Gerber:

Hình dạng và vị trí răng trước được thiết lập theo đường căn bản của mũi.

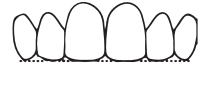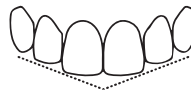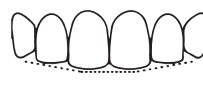

Theo hình dạng của đường đỉnh xương ổ răng:

Nếu không có thông tin cho các phân loại trên thì hình dạng răng được sử dụng có thể dựa vào hình dạng của đỉnh xương ổ răng.

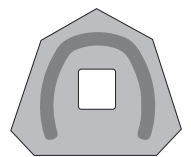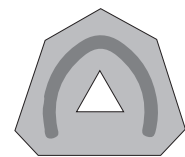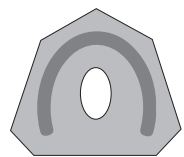

RĂNG CỐI

Giải phẫu học:



Răng cối được đặc trưng nhờ kết cấu giải phẫu nổi bật rõ ràng nhằm đảm bảo nó có thể thay đổi được để áp dụng cho tất cả các kỹ thuật lắp ráp. Góc mũi răng: 25°-33°.

Hình học:

Răng cối được xây dựng dựa trên nghiên cứu của Strack để nhận được những bộ răng giả có tính cân đối giữa hai bên răng. Góc mũi răng: 20°.



Nghiên cứu chất liệu và áp dụng kỹ thuật để cải thiện chất lượng

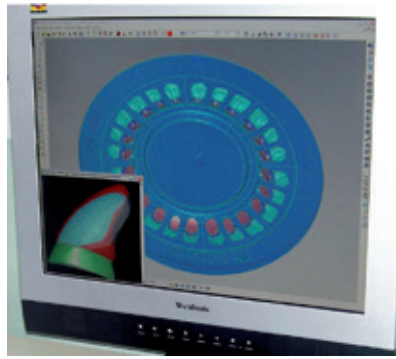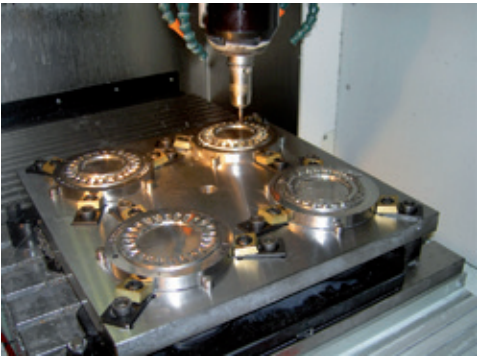

Hình 3D
của ngà răng



Hình 3D
của lớp men răng



Hình 3D
của mặt cắt bên trong răng



Sản phẩm chất lượng tốt nhờ sử dụng kỹ thuật CAD/CAM mới nhất

Nhựa resin cao phân tử H.M.W (Liên kết chéo PMMA)

Sử dụng các hợp chất cao phân tử polymer kết hợp với các cầu nối phân tử đặc biệt (liên kết chéo) giúp mang lại:


- Độ cứng vượt trội
- Chống mài mòn tuyệt vời
- Màu sắc ổn định
- Ngăn ngừa tốt các mảng bám răng

Phân tử PMMA

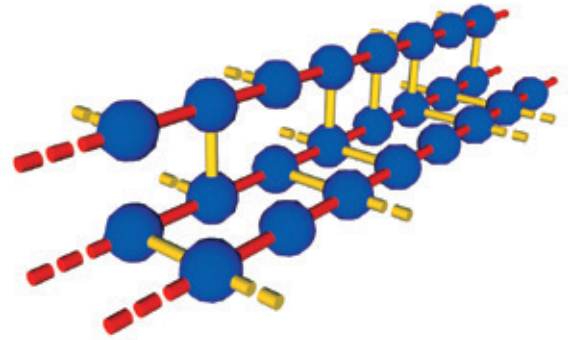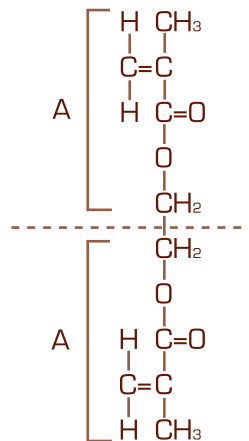

- Liên kết chéo giữa các chuỗi phân tử
- Liên kết đa phân tử Polymer giữa các đơn phân tử Monomer
- Đơn phân tử Monomer


Ánh màu

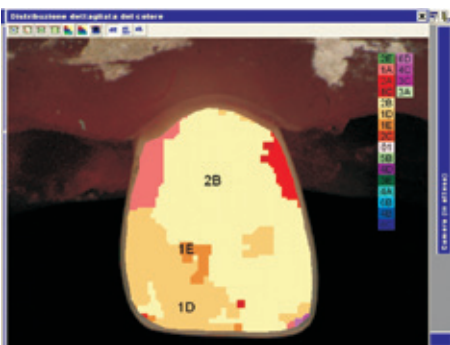

Răng Ruthinium có nhiều màu đa dạng. Sử dụng dụng cụ đo quang phổ ảnh kiểm soát ánh màu nhằm đảm bảo màu sắc thật không đổi.



Huỳnh quang là một dạng phát quang thấy được trong một số hợp chất nhất định. Răng tự nhiên sẽ có đặc tính này mà khi được chiếu tia cực tím sẽ cho ra ánh sáng trắng hơi xanh. Đặc điểm này được tìm thấy trong tất cả răng Ruthinium, do đó răng trông tự nhiên hơn.

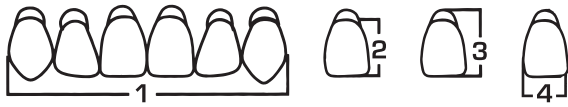

Shade Guide

Acry Rock V
A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4
B1 - B2 - B3 - B4
C1 - C2 - C3 - C4
D2 - D3 - D4
E1
F1 - F2





Hình vuông



Hình tam giác



Hình trứng

Articulation table

S 13	I 13	D 35
S 14	I 13	D 35
S 15	I 38	D 37 - D 43
S 17	I 41	D 39 - D 44
S 18	I 18	D 39 - D 44
S 25	I 18	D 39
S 26	I 46	D 39 - D 45
S 32	I 41 - I 42	D 39 - D 44
S 33	I 46	D 45
S 37	I 37	D 36 - D 42
S 38	I 38	D 37 - D 43
S 39	I 51	D 35
S 40	I 40	D 36 - D 42
S 41	I 41	D 39 - D 44
S 42	I 42	D 39 - D 44
S 47	I 18 - I 53	D 39
S 48	I 46	D 45
S 51	I 51	D 35
S 52	I 52	D 36 - D 42
S 53	I 53	D 39 - D 44
S 54	I 53	D 39 - D 44
S 55	I 66	D 45 - D 46
S 56	I 46	D 45
S 60	I 60	D 33
S 61	I 61	D 36 - D 42
S 62	I 61	D 36 - D 42
S 63	I 63	D 39 - D 44
S 64	I 64	D 41
S 65	I 65	D 41
S 66	I 66	D 44
S 67	I 67	D 45
S 68	I 68	D 46




AcryRock

We take care of your smile



Product Code	
0010013	ACRY ROCK V. 6 UPPER
0010014	ACRY ROCK V. 6 LOWER
0010015	ACRY ROCK V. 8 UPPER
0010016	ACRY ROCK V. 8 LOWER
0020003	ACRY ROCK V. SET 28
0020004	LIVE MOULD CHART ACRY ROCK V.
0030002	SHADE GUIDE ACRY ROCK V.



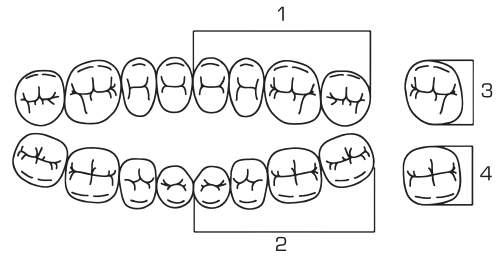

A: Giải phẫu học

B: Hình học

D33 (1) 26,9 (2) 30,5 (3) 7,2 (4) 8,1



D35 (1) 30,7 (2) 33,0 (3) 8,5 (4) 5,5



D42 (1) 28,7 (2) 30,6 (3) 8,2 (4) 7,8



D36 (1) 28,8 (2) 31,1 (3) 8,2 (4) 8,6



D43 (1) 29,6 (2) 31,4 (3) 8,3 (4) 8,1



D37 (1) 30,7 (2) 33,2 (3) 8,4 (4) 8,8



D44 (1) 31,1 (2) 30,0 (3) 8,5 (4) 8,6



D39 (1) 30,1 (2) 35,0 (3) 8,5 (4) 8,5



D45 (1) 31,0 (2) 33,3 (3) 8,8 (4) 8,6



D41 (1) 30,0 (2) 33,5 (3) 8,6 (4) 8,9



D46 (1) 33,6 (2) 35,6 (3) 9,6 (4) 9,2



RUTHINIUM® được thành lập năm 1965 là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực nha khoa với hơn 50 năm kinh nghiệm, chuyên sản xuất răng giả bằng nhựa tổng hợp và các sản phẩm labo ngành nha khoa.

Nhà máy hoạt động trên khắp nước Ý, xuất khẩu hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới, Châu Âu, Châu Phi, Đông Nam Á, Úc, Nam Mỹ và Mỹ với lượng hàng sản xuất lên hơn **100.000 răng mỗi ngày**.

Tiêu chuẩn chất lượng Quốc Tế:

CE 0476 - 93/42/EEC Directive, Annex II, UNI CEI EN ISO 13485:2012, UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2010, Chứng nhận xuất xứ C/O.



RĂNG NHỰA TỔNG HỢP TRONG PHỤC HÌNH RĂNG GIẢ

Răng acrylic polymethacrylate sản xuất với hai lớp màu.

- Hiệu ứng thẩm mỹ cao nhờ cấu tạo hai lớp và phần tạo thù cạnh cắn.
- Sử dụng nguyên vật liệu chất lượng cao.
- Nhiều khuôn răng và màu sắc giúp đáp ứng được yêu cầu cao về thẩm mỹ.

Bao gồm 19 màu, 32 khuôn răng cửa trên, 19 khuôn răng cửa dưới và 22 khuôn răng cối.

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM



N.K.LUCK VIỆT NAM
CUNG CẤP THIẾT BỊ - VẬT LIỆU - DƯỢC PHẨM NGÀNH NHA KHOA

Showroom - Trung Tâm Chăm sóc Khách hàng:
K0.01, Đường B-Bắc, Khu phố Star Hill
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel **(028) 5412 2662 - 5412 2882**

Cửa hàng:
781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12
Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel **(028) 3862 0090 - 3863 4172**

Văn Phòng Đại Diện tại Hà Nội:
30 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel **(024) 3632 0199**

Hotline **0919 118 798** • Tư vấn Kỹ thuật **0916 908 798**
www.nkluck.vn nkluck@hcm.vnn.vn



Dental Manufacturing S.p.A.
Via Ca' Mignola Nuova, 1699
45021 Badia Polesine (RO) - Italy
Tel. +39.0425.51628 - +39.0425.590587 Fax +39.0425.590156
www.ruthinium.it info@ruthinium.it